

DATI TECNICI

STERILIZZATORI GETINGE SERIE K		
Tipo di processo	Programmi standard	Tempo di esecuzione
Ciclo B	Imballati a 134°C	~25 min
Ciclo B	Imballati a 121°C	~39 min
Ciclo B	134°C Tessuti	~29 min
Ciclo N	Flash a 134°C	~9 min
Ciclo B	Prion a 134°C	~38 min

I tempi di esecuzione sono approssimativi e si riferiscono ad un intero processo, completo di asciugatura, a carico normale. Oltre ai programmi di sterilizzazione, sono disponibili due programmi per test: Bowie & Dick e prova di tenuta.

Validazione

Gli sterilizzatori sono predisposti per il collegamento di sensori di temperatura e pressione esterni ed indipendenti per la validazione secondo la EN 554.


Impianto di allacciamento acqua e requisiti

Caratteristiche dell'acqua: distillata o deionizzata, max. 30 µS/cm

Consumo d'acqua: 0,2-0,4 l/ciclo

Volume del serbatoio: 5 l


Pressione dell'acqua: minimo 1,0 bar (solo per modelli con serbatoio ed impianto integrati)

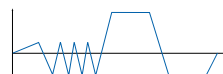

Processo B (diagramma)



Processo N (diagramma)

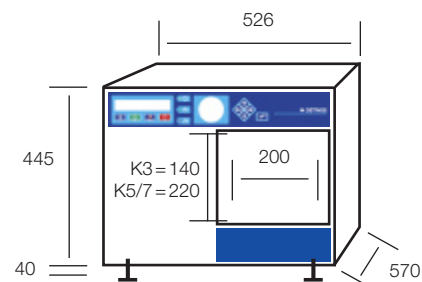

Volume della camera:
K3 = 10 litri, K5 = 15 litri,
K7 = 20 litri

Filtro per deionizzazione DS2000

Capacità a 200 ppm: circa 520 l

Può essere montato a sinistra o a destra dello sterilizzatore oppure su una parete adiacente.

Elettricità

monofase, 230 V, 10 Amp.




Livello acustico

<60 dB

Documentazione del processo

Mediante stampante separata o collegamento PC.

ACCESSORI

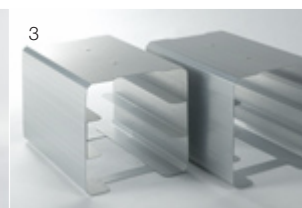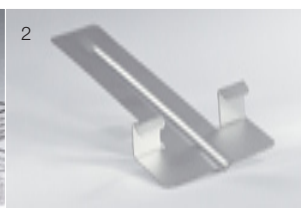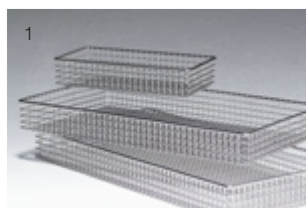

Una serie di accessori per sterilizzatori Getinge serie K

- Vassoio, 380x190x38 mm, 330x190x38 mm o 100x190x38 mm
- Impugnatura per vassoio
- Supporti per contenitori
- Deionizzatore DS2000 da collegare all'impianto acqua e scarico acqua
- Supporto per sacchi (per facilitare l'asciugatura dei prodotti)

- Contenitore per strumenti odontoiatrici, completo di coperchio ed inserto, 287 x 186 x 39 mm

- Stampante

Per gli sterilizzatori Getinge serie K sono disponibili molti altri accessori. Per informazioni visitare il sito www.skarhamn.getinge.com oppure rivolgersi al rivenditore Getinge più vicino.



Getinge fornisce soluzioni complete per operazioni efficaci ed efficienti di pulizia, disinfezione e sterilizzazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria e dei settori scientifico e farmaceutic. Il nostro know-how comprende tutto ciò che va dalla progettazione architettonica, produzione e apparecchiature per la movimentazione, ai sistemi per consentire la completa tracciabilità dei prodotti sterili. Il nostro impegno prevede consulenza di esperti, formazione e supporto tecnico a lungo termine.

GETINGE

Getinge S.p.A.
 Via dei Buonvisi 61/D
 IT-00148 Roma
 info@getinge.it
 www.getinge.com/it
 Phone: +39-06656631

GETINGE

IL GRUPPO GETINGE è leader al livello mondiale per la fornitura di attrezzature ed impianti volti ad accrescere la qualità e la convenienza economica nel settore dell'assistenza sanitaria e dei settori scientifico e farmaceutic. Le attrezzature, i servizi e le tecnologie sono suddivisi nel modo seguente: al marchio **ARJO** appartengono i prodotti per l'igiene, la movimentazione e la cura dei pazienti, il marchio **GETINGE** contraddistingue i prodotti per la disinfezione e la prevenzione nell'ambito sanitario e dei settori scientifico e farmaceutic, mentre **MAQUET** fornisce i prodotti per sale operatorie, patologie cardiorespiratorie e terapie intensive.

GETINGE

GETINGE SERIE K STERILIZZATORI DA BANCO




STERLIZZAZIONE AD ALTA VELOCITÀ PER RISPARMIO E PRATICITÀ D'USO

Gli sterilizzatori Getinge serie K sono modelli da banco eccezionalmente veloci e ad elevata potenza. Infatti, un solo sterilizzatore fa il lavoro di due!

In appena 25 minuti è possibile sterilizzare fino a 10 vassoi utilizzando il programma di processo B. Ciò significa 20 vassoi all'ora. E se è necessario solo un programma flash per prodotti non imballati, questo richiede solo 9 minuti. In altre parole, è possibile ridurre nettamente il numero di strumenti necessari in uno studio.

Gli sterilizzatori Getinge serie K sono dotati di camere rettangolari che consentono di utilizzare quasi il 100% del volume per la sterilizzazione di vassoi e contenitori. In una camera circolare, viene sprecato il 25% del volume.

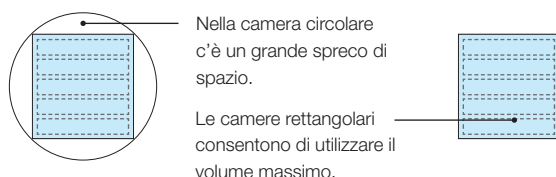

Fino a 10 anni di garanzia

Produciamo sterilizzatori da oltre 50 anni, quindi sappiamo bene cosa possono fare le nostre straordinarie macchine. Ecco perché Getinge è in grado di offrire una garanzia anch'essa straordinaria: una garanzia generale di due anni, cinque anni sulla pompa del sistema da vuoto e dieci anni sulla camera e gli elementi scaldanti del generatore di vapore.

Processo B ben sperimentato

La EN 13060 è la nuova norma europea per piccoli sterilizzatori in vigore da settembre 2004, che fissa i requisiti di capacità per la sterilizzazione con processo B a vuoto di strumenti cavi e imballati e tessili. Gli sterilizzatori Getinge serie K hanno questa capacità fin dal 1989.

Sportello scorrevole di sicurezza

Sapevate che gli sportelli degli sterilizzatori sono soggetti ad una pressione di un'intera tonnellata? Gli sportelli

degli sterilizzatori tradizionali poggiano su cerniere e si bloccano per resistere a questa forza. Gli sterilizzatori Getinge serie K offrono una soluzione più sicura: uno sportello scorrevole fissato su robuste guide.

Il particolare design protegge anche l'utente dal contatto con l'interno bollente dello sportello e non interferisce con lo spazio solitamente ridotto davanti allo sterilizzatore.

Facile da usare e richiede una manutenzione semplice

La semplicità d'uso e la facile manutenzione sono altre caratteristiche peculiari degli sterilizzatori Getinge serie K.

- Facile da usare: basta caricare, chiudere lo sportello e premere "start".
- Manutenzione semplice e a costi ridotti grazie all'esclusivo design con pochi componenti.
- Serbatoio acqua in acciaio inossidabile facilmente accessibile per la pulizia; in questo modo si impedisce la formazione dell'anti-igienico biofilm.
- Basso consumo di acqua deionizzata, appena 0,2-0,4 litri per un processo standard.
- Facile collegamento all'impianto esterno di alimentazione dell'acqua.

Il modello giusto per ogni esigenza

Gli sterilizzatori Getinge serie K sono disponibili in tre modelli, ognuno con capacità di carico diverse. Sia che si tratti di un intero studio o di un piccolo ambulatorio odontoiatrico, è disponibile una misura adatta ad ogni singola esigenza.

STERILIZZATORI GETINGE K5/K7

FINO A 20 VASSOI E 20 MINIVASSOI ALL'ORA

Programma standard da 25 minuti

Il processo B standard richiede appena 25 minuti.

Programma flash da 9 minuti

Il programma flash (processo N) per strumenti solidi non imballati richiede solo 9 minuti.

Elevata capacità e produttività


La camera rettangolare può essere utilizzata in modo ottimale per la massima capacità di carico, ideale per vassoi, contenitori e supporti per strumenti odontoiatrici. In appena un'ora, è possibile sterilizzare fino a 20 vassoi di strumenti (in uno sterilizzatore Getinge K5). E lo sterilizzatore Getinge K7 profondo 100 mm gestisce 20 vassoi per strumenti più 20 minivassoi nello stesso breve tempo!

Un simile sterilizzatore ad elevata produttività fa il lavoro di due! Gli strumenti sono sterilizzati e nuovamente pronti per l'uso in brevissimo tempo, il che significa che sono necessari meno prodotti ed è quindi possibile tagliare sui costi di investimento, aumentando quindi la redditività.


Per studi medi

Gli sterilizzatori Getinge K5 e K7 sono ideali per studi o ambulatori medi con un elevato utilizzo e rotazione di prodotti sterili.

L'ulteriore profondità della camera dello sterilizzatore Getinge K7 lo rende particolarmente adatto anche per coloro che devono sterilizzare strumenti più lunghi quali endoscopi e strumenti speciali per impianti chirurgici.

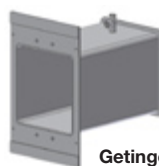


Getinge K5
profondità: 345 mm

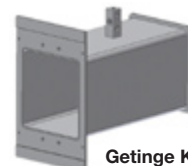

Getinge K7
profondità: 445 mm


Ecco quanto riesce a sterilizzare Getinge K5 in un'ora:

20 vassoi

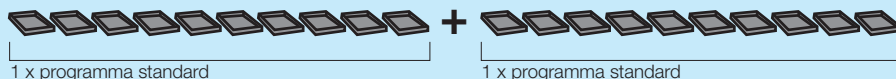

Ecco quanto riesce a sterilizzare Getinge K7 in un'ora:

20 vassoi + 20 minivassoi

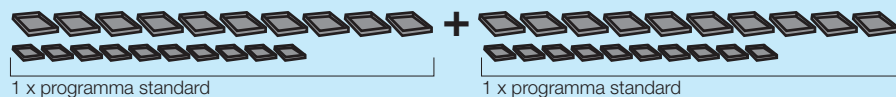

STERILIZZATORE GETINGE K3

12 VASSOI ALL'ORA

Programma standard da 25 minuti

Il processo B standard richiede appena 25 minuti.

Programma flash da 9 minuti

Il programma flash (processo N) per strumenti solidi non imballati richiede solo 9 minuti.

Elevata capacità e produttività


La camera rettangolare può essere utilizzata in modo ottimale per la massima capacità di carico, ideale per vassoi, contenitori e supporti per strumenti odontoiatrici. In appena un'ora, è possibile sterilizzare fino a 12 vassoi di strumenti.

Gli sterilizzatori Getinge K3 offrono una produttività più elevata rispetto agli sterilizzatori tradizionali delle stesse dimensioni. Gli strumenti sono sterilizzati e nuovamente pronti per l'uso in brevissimo tempo, il che significa che sono necessari meno prodotti ed è quindi possibile tagliare sui costi di investimento, aumentando quindi la redditività.

Per studi piccoli e medi

Gli sterilizzatori Getinge K3 sono ideali per studi/ambulatori piccoli e medi con una normale rotazione di prodotti sterili e dov'è necessario un processo ad alta velocità.

La profondità della camera è la stessa degli sterilizzatori Getinge K5, ma l'altezza, e quindi la capacità, è inferiore.

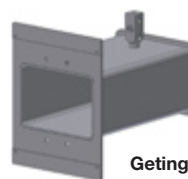

Getinge K3
profondità: 345 mm

Ecco quanto riesce a sterilizzare Getinge K3 in un'ora:

12 vassoi

